

Fix - clip

(Хірургічна фіксуюча кліпса Fiz-clip)

Хірургічна фіксуюча кліпса Fiz-clip - загальний хірургічний інструмент що використовують для фіксування хірургічної нитки при з'єднанні тканин під час виконання оперативних втручань.

Належить до підгрупи інструментів для з'єднання тканин.

Кліпсу-фіксатор № FS 0030 застосовують для отримання внутрішньошкірних швів, для оптимального косметичного результату.

Шкіру проколюють лише в двох місцях.

Не потребує шовних вузлів.

Фіксація хірургічної нитки двома кліпсами.

Після загоєння рани, обрізають одну із кліпсів та шви легко видаляються другою кліпсою.

Застосовують разом з хірургічними нитками розміром EP 1-2 (USP 5/0 — 3/0).

Протипоказання: відсутні

Правила використання: Матеріал призначений для одноразового використання!

Не використовуйте матеріали з пошкодженою упаковкою!

Перед використання перевірте термін придатності вказаний на етикетці!

Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності!


Повторна стерилізація заборонена!

Попередження: Перед використанням матеріалу медичний персонал (лікарі, ветеринарі, а також медсестри) повинні бути ознайомлені з хірургічними методами і технікою роботи з хірургічними фіксуючими кліпсами Fiz-clip.

З хірургічними фіксуючими кліпсами Fiz-clip може працювати лише кваліфікований персонал (лікарі, медсестри).

Стерилізація: Матеріал стерилізований етиленоксидом

Зберігання: Матеріали необхідно зберігати в чистих і сухих приміщеннях, при температурі 10 - 25 °С, в захищеному від впливу будь-якої вологи та випарів місці.

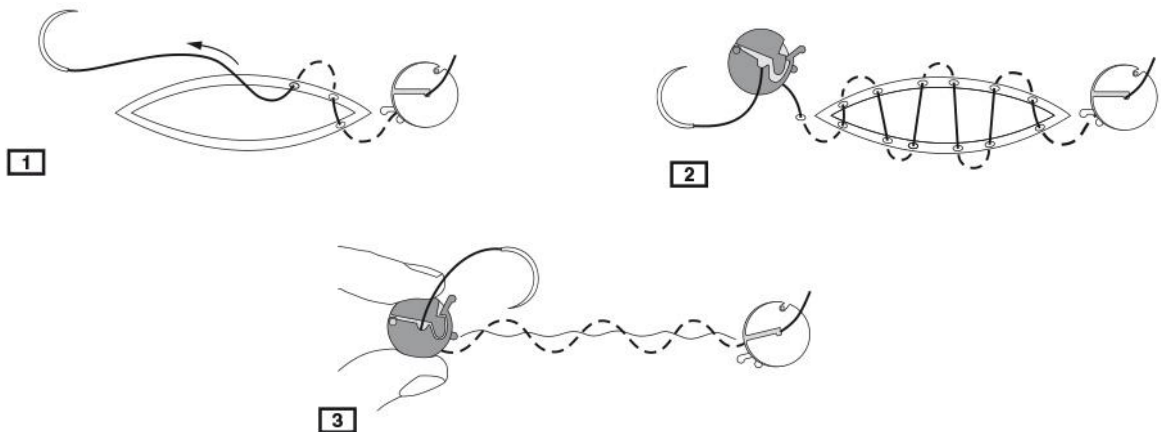

UA ВИКОРИСТАТИ ДО / КОД ПАРТІЇ / НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ / ЗАСТОРОГА! ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СУПРОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ / Символ CE і ідентифікаційний номер нотифікованої особи. Продукт відповідає вимогам Директиви Європейської Ради 93/42/СЕС щодо медичних виробів / ВЕРХНЯ МЕЖА ТЕМПЕРАТУРИ / Не застосовувати препарат, якщо упаковка пошкоджена



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
Юридична адреса: 79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua



Producer: **Chirmax, s. r. o.**
Komoranska 955, 143 10 Praha 4
Czech republic
tel: +420-241 773 765,
241 773 238,
241 768 407- 8
fax: +420-244 400 910
e-mail: objednavky@chirmax.cz