


# CHIRANEM

## Інструкція з використання Системи для переливання крові одноразового використання

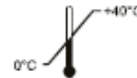

20 КРАПЕЛЬ = 1мл ± 0,1 мл (1г ± 0,1 г)  
Фільтр 200 μм

Містить або ж в ній присутні фталати:  
Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP))



**Опис:** Система для переливання крові одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

**Склад:** Вироби складаються з кришки пристосування для проколювання пробки, пристосування для проколювання пробки, трубки, крапельної камери, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора потоку і т.д. Є різні розміри голок.

**Область застосування:** Застосовується для переливання крові в клінічних умовах, а також використовується для надання медичної допомоги.

**Заборони для застосування:** Застосовувати тільки для переливання крові.




1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, необхідно вирішити її відповідно з робочим порядком клініки;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Довгострокове використання систем для переливання крові, що містять DEHP, у грудних немовлят, дітей або вагітних жінок може підвищити ризик порушення роботи їх ендокринної системи;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Закрийте регулятор потоку, зніміть кришку з пристосування для проколювання пробки, вставте пристосування для проколювання пробки в мішок з кров'ю й уникніть можливому її витоку;
2. Пальцем натисніть на крапельну камеру, і дайте можливість камері наполовину наповнитися кров'ю;
3. Відкрийте регулятор потоку, випустіть повітря, поспостерігайте за утворенням крапель і запустіть трансфузію;
4. Перед використанням щільно вставте голку і попередьте можливий витік.



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»  
Площа Д-ра Швейцера, 194  
916 01 Стара Тура  
Словацька республіка  
Тел.: +421 / 32/7709 991  
Факс: +421/32/7709 956  
[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)

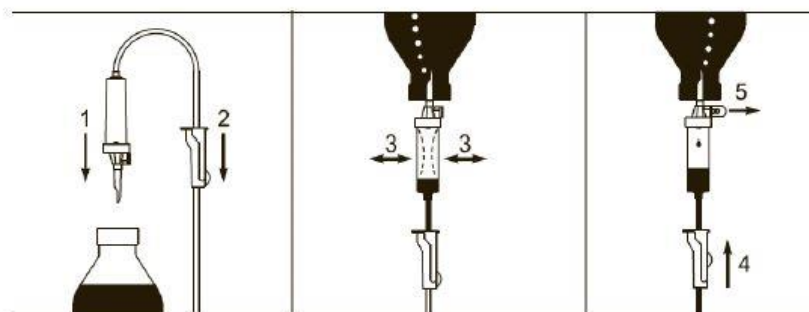

Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128  
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 [www.medservis.com.ua](http://www.medservis.com.ua)