

SCALP VEIN SET CHIRAFLEX

CHIRAFLEX Інтравенозна канюля тип "Метелик"

Рекомендований спосіб застосування CHIRAFLEX
Інтравенозної канюлі тип "Метелик" одноразового використання



Містить або ж в ній присутні фталати:
Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)



Опис:
Склад:
Область застосування:

Система з канюлею тип "Метелик" одноразового використання. Стерильно, нетоксично, апірогенно. Вироби складаються з канюлі, ручки, м'якою трубки, горловини і запобіжного ковпачка. Даний продукт використовується при рутинному заборі крові і / або для короточасного внутрішньовенного вливання препаратів. Голка з крильцями забезпечена запобіжним пристосуванням, яке можна використовувати для закриття голки відразу ж після забору крові / вливання, що дозволяє попередити можливе випадкове поранення голкою. Даний продукт може застосовувати тільки спеціально навчений для цього медичний персонал відповідно до цієї інструкції. Не використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю на будь-який з компонентів виробу.

Заборона:



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Вироби повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка, або ж термін дії закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, її необхідно вирішити відповідно до стандартів лікування;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Вливання розчинів на основі ліпоїдів може підвищити ризик порушення роботи ендокринної системи у дітей, грудних немовлят, або ж у вагітних жінок, тому необхідно цього уникати.
7. Повторна стерилізація, або ж повторне використання можуть викликати інфекцію, або ж взаємну перехресну реакцію.



1. Перед використанням розкрийте упаковку в позначеному місці;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожна використана голка вважається зараженою і відразу ж після використання повинна бути ліквідована в належному контейнері для «іждких» біологічних відходів;
4. Під час використання і ліквідації продукту тримайте голку за її основу.



Увага



Див. інструкцію з використання

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Одноразового використання



Серійний номер



Дата виготовлення



Використати до / Строк придатності



Стерилізовано етиленоксидом



Виробник



Виріб не містить латекс



Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»
Площа Д-ра Швейцера, 194
916 01 Стара Тура
Словацька республіка
Тел.: +421 / 32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua